

AnnaCare - Inbetriebnahme


1.



Sensor-Pad platzieren

2.

**Optional bei
Y-Adapter:
Birntaster
einstöpseln**

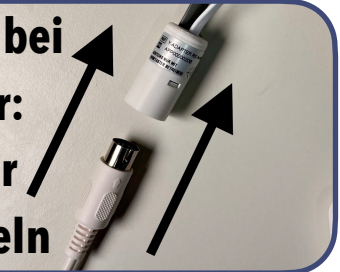

3.

**In Rufanlage
einstöpseln**



4.

In Bett einsteigen



5.


**Blinken abwarten!
10 – 30 Sekunden**

6.


**Auf Dauerleuchten warten!
40 – 60 Sekunden**

**Bei Blinken:
Alarmierung ist noch inaktiv!**


**Erst ab Dauerleuchten:
Bett-Exit Alarm ist aktiv**

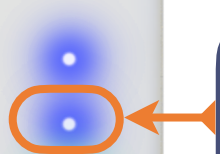

AnnaCare - Einstellungen

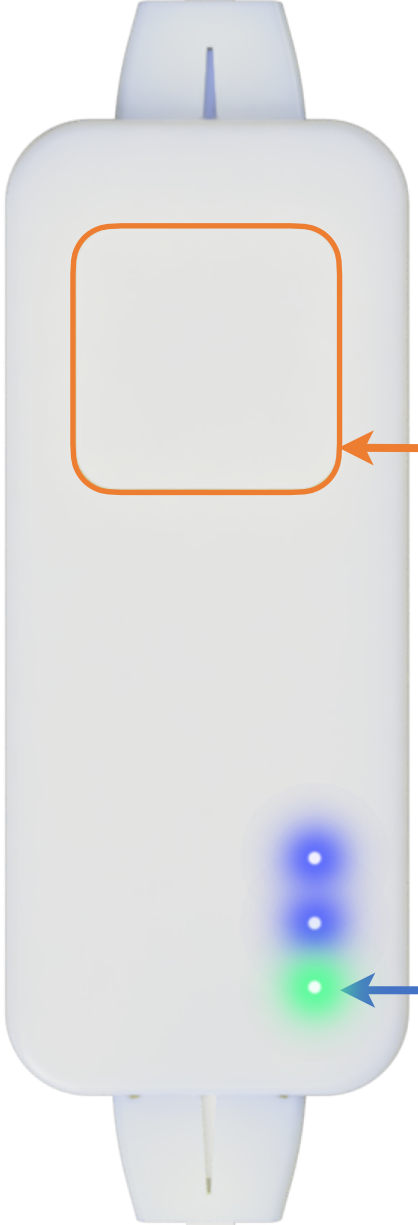

Verzögerte Alarmierung
Ein-/Ausschalten

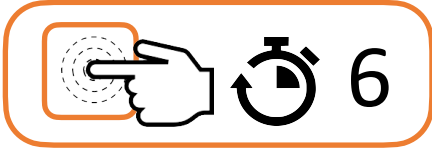

Knopf 6 Sek. halten

Alarmierung de-/aktivieren



Knopf doppelklicken

Status-LED				
	Sofort Grün	Verzögert Gelb	Kalibrierung Violett	Deaktiviert Rot