

AnnaCare - Inbetriebnahme


1.



Sensor-Pad platzieren

2.

Optional bei
Y-Adapter:
Birntaster
einstöpseln

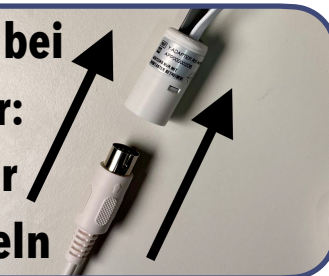

3.



In Rufanlage
einstöpseln

4.



In Bett einsteigen

5.

Blinken abwarten!
10 – 30 Sekunden


Bei Blinken:
Alarmierung ist noch inaktiv!

6.

Auf Dauerleuchten warten!
40 – 60 Sekunden


Erst ab Dauerleuchten:
Bett-Exit Alarm ist aktiv

AnnaCare - Einstellungen

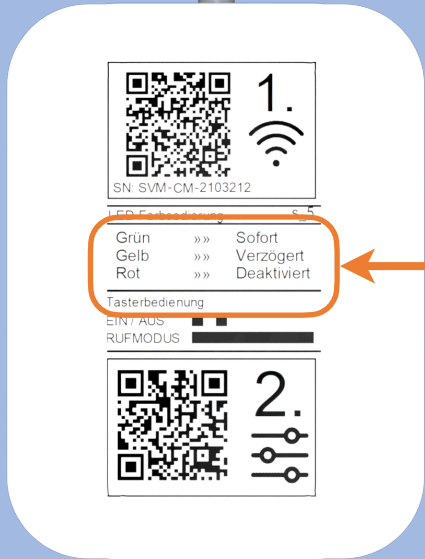



Alarmierungsmodus ändern



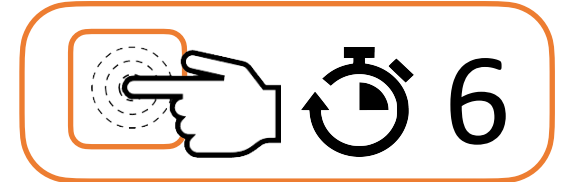

Versteckte Taste 6 Sek. halten

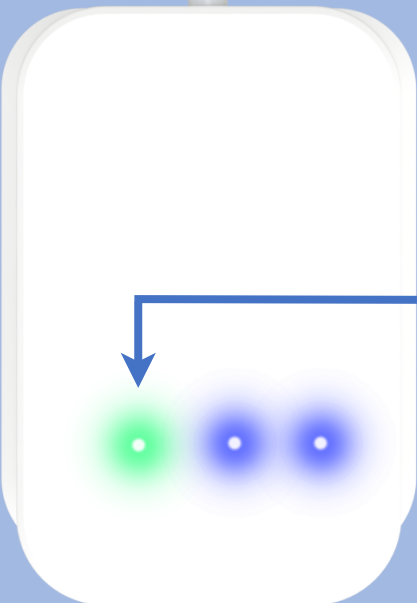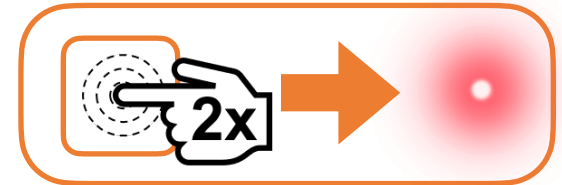

Alarmierung de-/aktivieren

Versteckte Taste doppelklicken



Status-LED		
Blau		Aufsteh-Früherkennung (In Entwicklung)
Grün		Bett-Exit Alarmierung (3 - 10 Sekunden)
Gelb		Verzögerte Alarmierung (siehe QR-Login)
Rot		Deaktiviert (durch Doppelclick an-/abwählbar)